

# Aumento mamario

 **MENTOR**<sup>®</sup>  
MAKE LIFE MORE *beautiful*<sup>™</sup>

Durante más de 20 años,  
Mentor ha sido reconocido  
mundialmente como el  
principal fabricante de  
implantes mamarios de la  
más alta calidad.





# Estamos disponibles para ayudarla

## TOME UNA **DECISIÓN** INFORMADA Y SEGURA.

Este folleto contiene la información más actualizada sobre implantes mamarios para cirugías de aumento o revisión que le ayudará a prepararse para el proceso por delante. En su interior encontrará la información básica sobre el aumento mamario y opciones de implantes mamarios de MENTOR® MemoryGel® y de solución salina. Aclarar cuáles son sus propios objetivos respecto de su aspecto e identificar las preguntas que querrá realizar durante el proceso son pasos importantes al considerar el aumento mamario. ¿Está lista para comenzar?

*Durante más de 20 años, Mentor ha sido reconocido mundialmente como el principal fabricante de implantes mamarios de **la más alta calidad**. Ofrecemos dos tipos básicos: implantes mamarios MemoryGel® y de solución salina.*

En nuestra extensa trayectoria abundan las primicias en la industria, los diseños innovadores de productos y la investigación revolucionaria. Mientras los demás fabricantes han ido y venido, Mentor ha producido de forma constante productos de vanguardia para el aumento mamario aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos). **Además, todos nuestros implantes vendidos en los Estados Unidos se fabrican aquí, en los Estados Unidos.**



# ÍNDICE

1. Todo comienza por usted
3. Anatomía del seno 101
5. ¿Qué tipo de implante mamario de MENTOR® es el correcto para usted?  
¿De gel de silicona o de solución salina?
11. ¿Qué puede decirse acerca del tamaño y la forma de un implante?
15. Opciones de incisión y colocación
19. Elección del médico cirujano adecuado para usted
23. Cirugía: los detalles
25. Información de seguridad importante
27. Póliza de reemplazo del producto y garantías limitadas de Mentor
31. Preguntas frecuentes sobre los implantes mamarios

Sus motivos son  
tan únicos como  
usted misma.



# TODO COMIENZA POR USTED

No es ningún secreto que lo que siente una mujer con respecto a su cuerpo tiene mucho que ver con la confianza total en sí misma. Si el tamaño o la forma de sus senos es un problema, muchas mujeres recurren al aumento mamario para incrementar su confianza, lucir mejor con su ropa y, en resumidas cuentas, presentar ante el mundo la imagen que ellas desean.


## ¿Cuál es su motivo para explorar la cirugía de senos?

- 👉 ¿Desea aumentar sus senos para que su cuerpo esté más proporcionado o para que sus senos sean más equilibrados en su tamaño?
- 👉 ¿Su objetivo es remodelar y aumentar sus senos porque han perdido su forma luego de haber estado embarazada y haber amamantado?


## Sus motivos son tan únicos como usted misma.

Por eso es importante comprender bien sus necesidades y expectativas personales y poder expresarlas a su médico cirujano. Juntos podrán analizar las opciones disponibles para usted y elegir los implantes correctos para su cuerpo y el resultado deseado. Además de la forma, el tamaño y la textura, también podrá elegir entre los implantes mamarios de MENTOR® MemoryGel® y de solución salina.



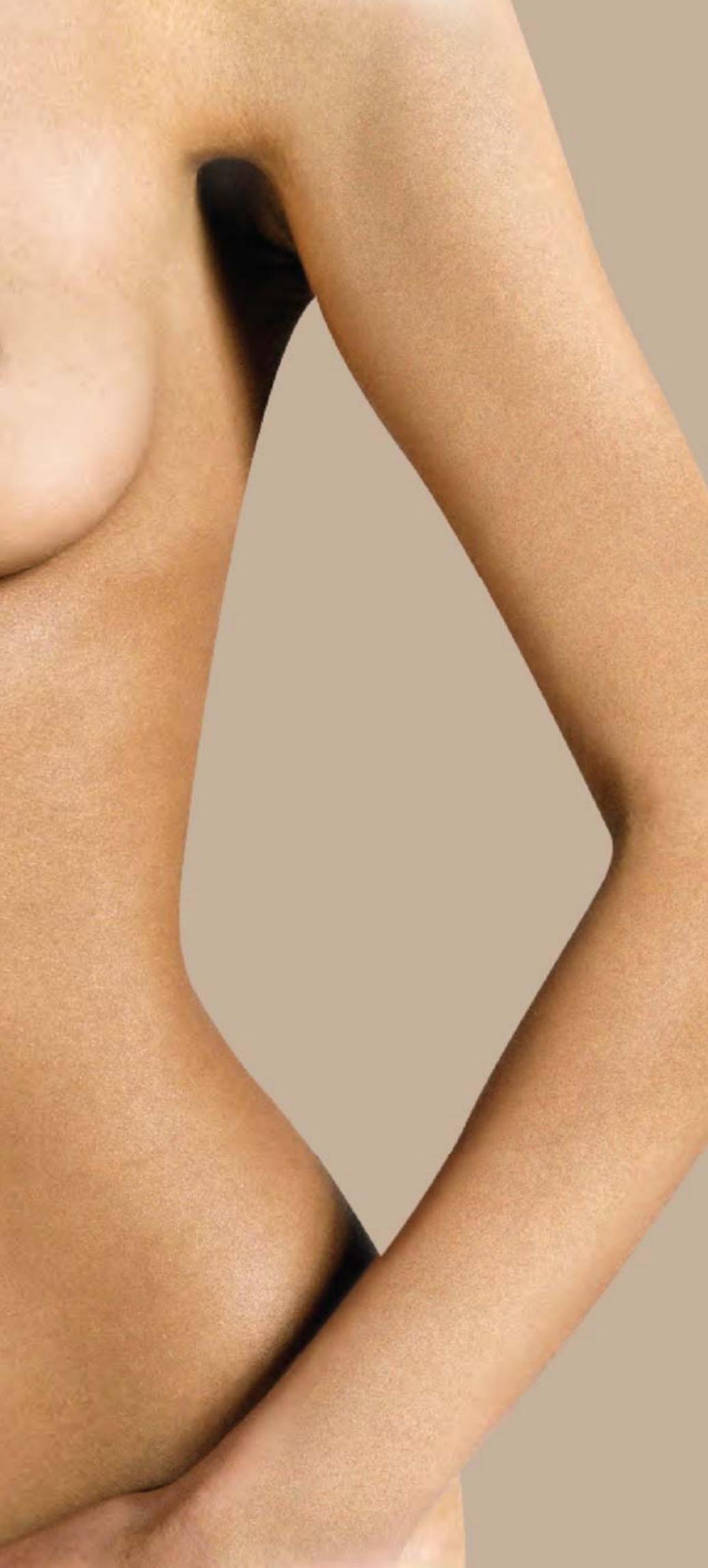

# ANATOMÍA DEL SENO 101

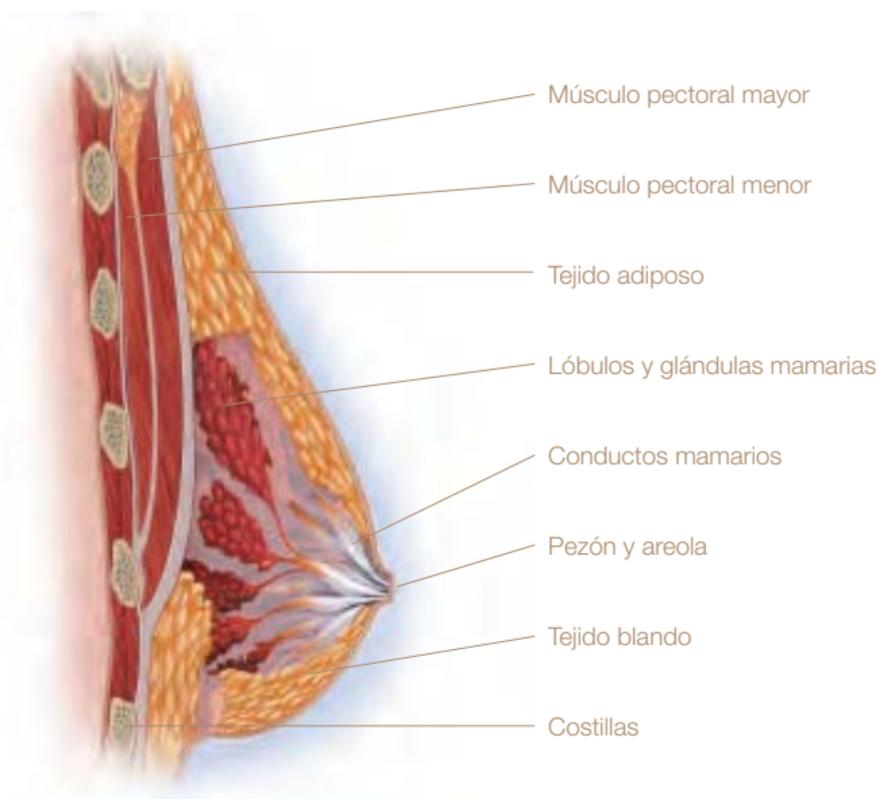

**El seno se compone de** conductos y glándulas mamarias, rodeadas de tejido adiposo que le proporciona forma y tacto. El músculo pectoral (músculo pectoral mayor) se ubica debajo del seno.

Factores como el embarazo (cuando las glándulas mamarias se dilatan temporalmente), el adelgazamiento rápido y los efectos de la gravedad a medida que se crece en edad pueden combinarse y ocasionar cambios en sus senos con el transcurso del tiempo.

Los implantes se utilizan para agrandar los senos; sin embargo, es posible que los implantes solos no logren levantar los senos de forma adecuada. Es posible que le recomienden procedimientos adicionales para lograr sus objetivos.

Procedimientos como la mastopexia se pueden sugerir al momento del aumento mamario para levantar los senos.

## LA DEFINICIÓN TÉCNICA DE UN IMPLANTE MAMARIO:

Un implante mamario es un saco (cápsula del implante) hecho de elastómero de silicona relleno con gel de silicona o solución salina, que se implanta quirúrgicamente debajo del tejido mamario o debajo del músculo pectoral.



# ¿QUÉ TIPO DE IMPLANTE MAMARIO DE MENTOR ES EL CORRECTO PARA USTED? ¿DE GEL DE SILICONA O DE SOLUCIÓN SALINA?

## Implantes mamarios MemoryGel®: una opción de confianza

Millones de mujeres en todo el mundo han confiado y utilizado con éxito los implantes MemoryGel® durante 20 años. ¿Por qué? **Porque nuestros implantes se sienten como tejido mamario natural, sin comprometer la fiabilidad ni la seguridad.** Luego de décadas de investigación y pruebas, los implantes mamarios MemoryGel® ahora están aprobados por la FDA para mujeres en los Estados Unidos. Los implantes MemoryGel® se presentan con una cubierta de superficie rugosa o lisa y están disponibles en una gran variedad de tamaños y perfiles para adecuarse a su cuerpo.

### ¿POR QUÉ ES ESTA IMAGEN IMPORTANTE PARA USTED?

Cortamos un implante mamario de MemoryGel® a la mitad para demostrar cómo el material del gel puede mantenerse unido de manera uniforme. Se comporta de ese modo debido a una sustancia cohesiva y gelatinosa que actúa como un elemento sólido en vez de un elemento líquido que mantiene su forma.





## EXCELENTES BENEFICIOS:

- 🌀 Los implantes mamarios MemoryGel<sup>®</sup> están aprobados por la FDA
- 🌀 Cada implante está relleno de gel cohesivo propiedad de Mentor
- 🌀 El gel de relleno se mantiene unido de manera uniforme y se ve y siente como tejido mamario natural
- 🌀 Los implantes poseen un volumen de llenado definido a fin de lograr resultados predecibles
- 🌀 Los implantes mamarios MemoryGel<sup>®</sup> vienen en tres opciones de proyección: perfil moderado (Moderate), moderado plus (Moderate Plus) y alto (High) para brindarle el aspecto que usted desee
- 🌀 Presentan dos opciones de textura de superficie: lisos y rugosos (SILTEX<sup>®</sup>)
- 🌀 Los implantes MemoryGel<sup>®</sup> están cubiertos por la garantía limitada Standard o Enhanced y la póliza de reemplazo de por vida de Mentor



## LA SEGURIDAD DE LOS IMPLANTES MAMARIOS DE SILICONA

Después de revisar años de investigación respecto de los implantes mamarios rellenos de gel de silicona, el Instituto de Medicina (IOM) llegó a la siguiente conclusión: “La evidencia sugiere que enfermedades o trastornos como enfermedades del tejido conectivo, cáncer, enfermedades neurológicas u otras dolencias o trastornos sistémicos no son más comunes en las mujeres que tienen implantes mamarios que en las que no tienen implantes.”

En noviembre de 2006, la **FDA aprobó los implantes mamarios de silicona** MemoryGel® para el aumento mamario y la reconstrucción mamaria.

*Mentor Worldwide LLC se dedica a realizar estudios clínicos de gran alcance a largo plazo.*

Durante el transcurso de los años, Mentor ha realizado rigurosas evaluaciones de seguridad en los implantes mamarios de gel y de solución salina. Actualmente Mentor tiene en curso tres estudios sobre implantes mamarios de gel de silicona que llevan 10 años con el objetivo de brindar más información clínica a los pacientes y médicos cirujanos. Como lo hemos hecho durante muchos años, en Mentor mantenemos el compromiso de brindar información objetiva sobre la seguridad de los implantes mamarios.

## IMPLANTES SALINOS:

- ③ Aprobados por la FDA
- ③ Estos implantes están rellenos de una solución de agua salada similar al líquido que constituye la mayor parte del cuerpo humano
- ③ Nuestros implantes salinos se sienten un poco más firmes que el gel
- ③ Tienen un volumen de relleno flexible que puede ajustarse durante la cirugía
- ③ Tres opciones de proyección: perfil moderado (Moderate), moderado plus (Moderate Plus) y alto (High)
- ③ Presentan dos opciones de textura de superficie: lisos y rugosos (SILTEX®)
- ③ Nuestros implantes de solución salina están cubiertos por la garantía limitada Standard o Enhanced y por la póliza de reemplazo de por vida de Mentor

## Implantes mamarios de solución salina de MENTOR®: otra opción

Los implantes mamarios de solución salina de MENTOR® también vienen en varias formas, tamaños, perfiles y texturas de superficie. Los implantes de solución salina se insertan en el cuerpo sin su relleno de solución. Una vez colocado, el implante se rellena hasta el tamaño predeterminado. Cuando se retira el tubo de llenado, el implante se cierra solo automáticamente.



Redondo liso de perfil moderado



Redondo liso de perfil moderado plus



Redondo liso de perfil alto



Redondo de SILTEX® de perfil moderado



SILTEX® CONTOUR PROFILE® de perfil moderado



SILTEX® CONTOUR PROFILE® de perfil alto

## Implantes de solución salina ajustables de MENTOR® SPECTRUM®

### *Una línea innovadora de implantes ajustables*

Con frecuencia, la decisión más difícil para la mayoría de las mujeres en cuanto al aumento mamario es elegir el tamaño. La línea innovadora de MENTOR® de implantes mamarios SPECTRUM® facilita el proceso de tomar esta decisión ya que el tamaño se puede ajustar después de la cirugía. De hecho, los implantes SPECTRUM® son los únicos implantes mamarios de solución salina ajustables postquirúrgicamente que le permiten al médico cirujano ajustar el tamaño del implante durante los seis meses siguientes al procedimiento.



Redondo liso  
SPECTRUM®



Redondo  
de SILTEX®  
SPECTRUM®



SILTEX® CONTOUR  
PROFILE®  
SPECTRUM®

## ¿CÓMO SE COMPARAN LOS IMPLANTES DE SILICONA Y SOLUCIÓN SALINA DE MENTOR?

### Implantes mamarios MemoryGel®

- Se sienten como si fuese tejido mamario natural
- Perfiles moderados, moderados plus y perfil alto
- Superficies lisas y rugosas disponibles en una variedad de tamaños

### Implantes mamarios de solución salina

- Varios perfiles
- Flexibilidad intraoperatoria de tamaños
- Válvula autosellante
- Adaptabilidad postoperatoria con el implante SPECTRUM®



## ¿QUÉ PUEDE DECIRSE ACERCA DEL TAMAÑO Y LA FORMA DE UN IMPLANTE?

### Los implantes mamarios no se miden según los tamaños de copa de los sostenes

Los implantes mamarios se miden en centímetros cúbicos (cc) y no según el tamaño de copa. Esto se debe a que el tamaño del implante utilizado depende del tamaño y la forma del pecho de cada mujer.

### Su médico cirujano evaluará sus senos y tejido cutáneo existentes

Este deberá determinar si tiene suficiente seno y tejido cutáneo para cubrir al implante mamario que usted esté considerando o, en algunos casos como después de un embarazo, si tiene demasiada piel extra. Si usted desea un tamaño de implante mamario que es demasiado grande para su tejido, el médico cirujano le advertirá que los bordes del implante se podrían ver luego de la cirugía.



**BODYLOGIC® SYSTEM**  
IMPLANT SELECTION GUIDE

ENHANCING ARTISTRY THROUGH LOGIC®

## SU MÉDICO CIRUJANO TAL VEZ UTILICE UN SISTEMA COMO BODYLOGIC.®

El sistema BodyLogic® de MENTOR® está diseñado para ayudar a los médicos cirujanos y su personal a tomar decisiones más informadas sobre la selección de productos para sus pacientes.

## Decidir sobre el *perfil* del implante es tan importante como el tamaño.

### ¿Redondo o anatómico?

Además del tamaño y la forma, los implantes mamarios están disponibles en diferentes perfiles. El perfil se refiere al nivel de proyección hacia adelante del implante sobre la pared torácica.

**Los implantes redondos son la opción más popular**, y están disponibles como implantes mamarios MemoryGel® o de solución salina.

Ambos tipos de implantes vienen en varios perfiles: moderado (Moderate), moderado plus (Moderate Plus) y alto (High). Los implantes de perfil alto ofrecen la mayor proyección hacia adelante para lograr una silueta más prominente y están diseñados para un área torácica más reducida.

**Nuestros implantes de solución salina**

**anatómicos** brindan una forma del seno con una curva similar a la de un seno maduro, y vienen en los estilos de perfil moderado y alto. Sin embargo, es importante saber que cuando los implantes anatómicos se colocan debajo del músculo pectoral, pueden adoptar una forma redonda.



Redondo liso

CONTOUR PROFILE®



## ¿Qué otra cosa determina si el implante se puede detectar al tacto?

La colocación del implante, su tamaño y la cantidad de piel y tejido que lo cubrirán también determinan la facilidad con la cual se puede percibir un implante. Por ejemplo, los implantes colocados de forma subglandular (por encima del músculo pectoral) suelen ser más notorios que los implantes colocados de forma submuscular (por debajo del músculo pectoral).



Su médico cirujano será la mejor referencia en cuanto a las ventajas y desventajas del lugar de incisión recomendado específicamente para usted.



# OPCIONES DE INCISIÓN Y COLOCACIÓN

Su médico cirujano será la mejor referencia en cuanto a las ventajas y desventajas del lugar de incisión recomendado específicamente para usted.

## Algunos datos:


### Tamaño de la incisión

El tamaño de la incisión para un implante de aumento mamario con gel será mayor que el tamaño de la incisión para un implante de aumento mamario con solución salina.

### Ubicación de la incisión

Hay tres lugares comunes de incisión:

- 🌀 Alrededor del pezón (periareolar)
- 🌀 En el pliegue del seno (inframamario)
- 🌀 Debajo del brazo (axilar)

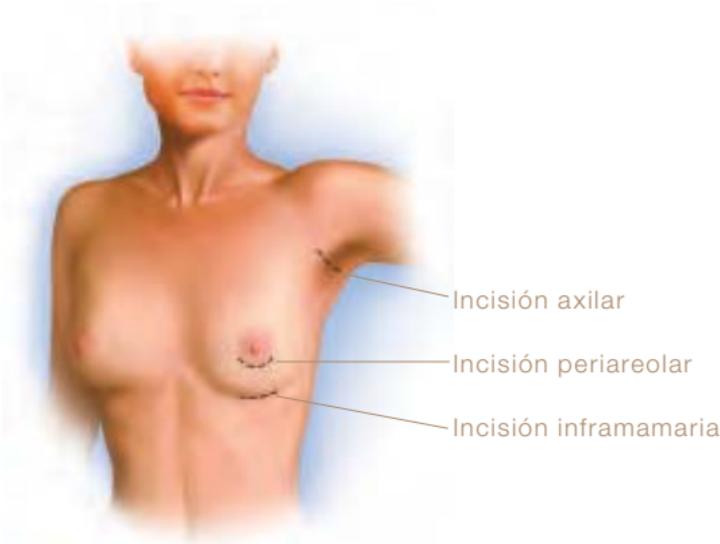

### Tipos de incisión

- 🌀 **Periareolar:** Esta incisión generalmente está más oculta, pero debido a que también implica cortar el tejido del seno, se asocia con una más alta probabilidad de producir dificultades para amamantar comparado con los otros lugares de incisión.<sup>2</sup> Cortar el tejido puede incrementar la posibilidad de que haya un cambio en la sensibilidad del seno o del pezón.

<sup>2</sup> Hurst, N.M. 1996. Lactation after augmentation mammoplasty. *Obstet. Gynecol.* 87(1):30-4.

- 🦋 **Inframamario:** Este es el lugar de incisión normalmente más utilizado en la actualidad. Esta incisión generalmente está menos oculta que la periareolar y es posible que ocasione menos dificultades para amamantar que el lugar de incisión periareolar.
- 🦋 **Axilar:** Esta incisión está menos oculta que la periareolar y es posible que ocasione menos dificultades para amamantar que el lugar de incisión periareolar. Si la incisión se efectúa debajo del brazo, el médico cirujano puede utilizar una sonda equipada con una cámara en miniatura, junto con instrumentos muy pequeños y mínimamente invasivos, a fin de crear un “bolsillo” para el implante mamario.
- 🦋 **Umbilical (ombligo):** Incisión efectuada por el canal umbilical. Este lugar de incisión no se ha estudiado en el estudio principal de Mentor.

## Otra consideración: Colocación del implante

El implante mamario se puede colocar parcialmente debajo del músculo pectoral mayor (submuscular) o encima del músculo y debajo de las glándulas mamarias (subglandular). Es importante comprender totalmente las ventajas y desventajas de la colocación del implante. Mire los beneficios y aspectos negativos de cada opción de colocación de implante en la página siguiente. **Su médico cirujano le recomendará el método que mejor se adapte a su tipo de cuerpo y a sus objetivos.**



## COLOCACIÓN SUBMUSCULAR Y SUBGLANDULAR

### Colocación submuscular

- ☞ La cirugía y la recuperación pueden ser más largas
- ☞ La recuperación puede ser más dolorosa
- ☞ Una reintervención puede ser más difícil
- ☞ Implantes menos visibles o palpables
- ☞ Captación de imágenes más fácil durante un examen de mamografía
- ☞ Puede ser preferible si su tejido mamario es fino o está debilitado

### Colocación subglandular

- ☞ La cirugía y la recuperación pueden ser más cortas
- ☞ La recuperación puede ser menos dolorosa
- ☞ Puede ofrecer un acceso más fácil en caso de una reintervención
- ☞ Implantes más visibles y palpables
- ☞ Captación de imágenes más difícil durante un examen de mamografía
- ☞ Puede no ser recomendable si su tejido mamario es fino o está debilitado

El médico cirujano  
esperará que usted  
realice preguntas,  
incluso delicadas.



## ELECCIÓN DEL MÉDICO CIRUJANO ADECUADO PARA USTED

¿Qué puede ser más importante? Recopile nombres, investigue la capacitación, experiencia y resultados de cada médico cirujano, programe consultas con los médicos cirujanos, haga preguntas, vea fotos del antes y del después, y luego utilice su mejor criterio para realizar su elección.

### ¿Se relaciona bien con el médico cirujano? ¿Se siente cómoda?

Además de la experiencia médica, la capacidad de relacionarse de un médico cirujano puede ser un factor importante al elegir al médico cirujano adecuado para usted. Luego de la consulta, pregúntese: ¿Se tomó el tiempo necesario para responder sus preguntas o sintió que la apuraban? ¿El personal fue atento, amable y auténticamente afectuoso? Sus preguntas y consideraciones son válidas. Es posible que quiera reunirse con más de un médico cirujano.

**El médico cirujano esperará que usted realice preguntas, incluso delicadas.** Un consejo: lleve sus preguntas escritas para no olvidarse de nada importante.



Estas son algunas de las preguntas que tal vez quiera realizar:

- 🌀 ¿Cuántos procedimientos de aumento mamario realiza cada año?
- 🌀 ¿Durante cuántos años ha realizado estos procedimientos?
- 🌀 ¿Ha obtenido la certificación de capacitación de Mentor para utilizar los implantes mamarios MemoryGel®?
- 🌀 **¿Está matriculado? Si es así, ¿en qué colegio o consejo médico?**
- 🌀 ¿En qué estados está autorizado para ejercer la cirugía? *(Tenga en cuenta que en algunos estados se brinda información a posibles pacientes sobre medidas disciplinarias y reclamos o acuerdos por mala praxis, ya sea por solicitud o a través de Internet).*
- 🌀 ¿Cuál es la complicación más común que ha encontrado respecto del aumento mamario?
- 🌀 ¿Cuál es su índice de reintervención en aumento mamario y cuál es el tipo de reintervención más común que usted realiza?
- 🌀 ¿Realiza este tipo de cirugía en un hospital o en un centro de cirugía independiente? *(Tenga en cuenta que los hospitales exigen la presentación de evidencia de capacitación adecuada en procedimientos específicos antes de permitir que los médicos cirujanos operen en sus instalaciones).*

**También querrá realizar preguntas sobre el procedimiento en sí durante su consulta inicial:**

- 🌀 **¿Cuáles son los riesgos y las complicaciones asociados a tener implantes mamarios?** *(Resalte los riesgos y las complicaciones que se mencionan en este folleto y lleve una copia con usted).*
- 🌀 ¿Cuántas operaciones de mis senos implantados puedo esperar tener en mi vida?
- 🌀 Si después decido que me extraigan los implantes, ¿cómo se verán mis senos?
- 🌀 ¿Qué forma, tamaño, texturas de superficie,

lugar de incisión y de colocación me recomienda?

- 👉 ¿Cómo se verá afectada mi capacidad para amamantar?
- 👉 ¿Cómo puedo esperar que se vean mis senos implantados con el tiempo?
- 👉 ¿Cómo puedo esperar que se vean mis senos implantados luego de un embarazo o de amamantar?
- 👉 ¿Cuáles son mis opciones si no estoy conforme con el resultado estético de mis senos implantados?
- 👉 ¿Qué procedimientos o productos alternativos hay disponibles si elijo no realizarme un implante mamario?
- 👉 ¿Tiene fotos del antes y del después que yo pueda ver de cada procedimiento?
- 👉 Me gustaría tener un tamaño de copa B (o C o D). ¿Cree que es adecuado para mi tipo de cuerpo?
- 👉 ¿Qué resultados puedo razonablemente esperar?

## CONSULTE A MENTOR

### **El sitio web [www.loveyourlook.com](http://www.loveyourlook.com)**

proporciona una lista de médicos cirujanos certificados en su área. Sólo haga clic en “buscar cirujano” (“find a surgeon”) y en pocos minutos tendrá varios médicos cirujanos con quienes comunicarse. También podrá obtener una lista de médicos cirujanos si se comunica con algunas organizaciones profesionales reconocidas, como:

- 👉 La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS, American Society of Plastic Surgeons)
- 👉 La Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética (ASAPS, American Society for Aesthetic Plastic Surgery)
- 👉 La Academia Americana de Cirujanos Estéticos (AACCS, American Academy of Cosmetic Surgeons)
- 👉 Su asociación médica local



# CIRUGÍA: LOS DETALLES

## **El entorno quirúrgico y la anestesia**

La mayoría de las veces, la cirugía de aumento se realiza de forma ambulatoria en una sala de operaciones especializada dentro de un hospital, un centro de cirugía o un área quirúrgica del consultorio del médico cirujano. Normalmente se utiliza anestesia general, pero también se puede optar por anestesia local con sedación.

## **Importante: el médico cirujano debe brindarle instrucciones específicas antes de la cirugía**

Pregúntele sobre cualquier análisis o examen prequirúrgico que sea necesario antes de la cirugía. También pregunte sobre el período de ayuno necesario o cuándo debería suspender su medicación habitual antes de la cirugía, y consulte sobre cualquier otra indicación que deba seguir.

## **Cuidados postoperatorios**

### **Dedíquese el tiempo necesario para relajarse y curarse: cuídese después de la cirugía**

La mayoría de las mujeres se sienten un poco cansadas y doloridas durante varios días luego de la cirugía. Sus senos tal vez continúen hinchados y sensibles al contacto físico durante un mes o más. También puede experimentar una sensación de tensión en el área de los senos mientras su piel se adapta al nuevo tamaño de los mismos. La sensación en el área de los senos y pezones también puede disminuir durante este período de hinchazón y recuperación postquirúrgica inmediata. Deberá hablar con su médico cirujano sobre las posibles complicaciones que puedan seguir a su cirugía de aumento mamario.

### **Los cuidados postoperatorios pueden variar**

Es posible que le indiquen que utilice un sostén postoperatorios específico, vendas de compresión o un sostén reforzado para tener apoyo y posicionamiento adicional mientras se cura. Es posible que algunos médicos cirujanos no deseen que usted use sostén durante un período de tiempo luego de la cirugía.

## ¿Cuándo puede reanudar sus actividades normales?

Hable con su médico cirujano sobre su estilo de vida y las actividades que desee abstenerse de realizar mientras su cuerpo se cura.

Probablemente pueda regresar a trabajar a los pocos días. Su médico cirujano probablemente desee que evite durante un par de semanas las actividades intensas que podrían elevar su pulso o presión arterial, o requerir el uso intenso de sus brazos y pecho. También es posible que su médico cirujano le recomiende realizar ejercicios de masaje mamario.



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

La colección de implantes mamarios de MENTOR® son indicados para el aumento mamario en mujeres a partir de los 22 años de edad en el caso de MENTOR® MemoryGel® y a partir de los 18 años de edad en el caso de implantes de solución salina o cuando se trate de casos de reconstrucción mamaria.

No se debe efectuar una cirugía de implante mamario en mujeres que:

- 🔥 tengan una infección activa en cualquier parte de su cuerpo,
- 🔥 tengan cáncer o un diagnóstico de precáncer de mama y que no hayan recibido tratamiento adecuado para tales afecciones,
- 🔥 que estén embarazadas o amamantando.

No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes con enfermedades autoinmunes (por ejemplo lupus y esclerodermia), un sistema inmune debilitado, trastornos que interfieren con la cicatrización de heridas y la coagulación de la sangre, o disminución del riego sanguíneo hacia el tejido mamario. Las pacientes con un diagnóstico de depresión, u otro desorden de la salud mental, deben esperar hasta la resolución o estabilización de estos trastornos antes de someterse a una cirugía de implante mamario.

Existen riesgos asociados a la cirugía de implante mamario. Debe saber que los implantes mamarios no son dispositivos de por vida y la implantación mamaria probablemente no implique una única cirugía. Es posible que necesite cirugías adicionales no planeadas en sus senos debido a complicaciones o resultados estéticos inaceptables. Muchos de los cambios en sus senos después del implante son irreversibles (no pueden deshacerse) y los implantes mamarios pueden afectar su capacidad de amamantar, ya sea por la reducción o la eliminación de la producción de leche.

Entre las complicaciones más comunes con los implantes mamarios de MENTOR® MemoryGel® se encuentran las reintervenciones, las contracturas capsulares, las asimetrías, los tumores o quistes mamarios y los dolores en el seno. Un riesgo menor de complicación es la ruptura del implante, que, en la mayoría de los casos, es silenciosa (lo que quiere decir que ni usted ni su médico sabrán que tiene una). Se recomienda realizarse estudios de resonancia magnética tres años después de la cirugía de implante inicial y luego cada dos años para detectar rupturas silenciosas.

Entre las complicaciones más comunes de los implantes mamarios de solución salina de MENTOR® se encuentran las reintervenciones, la extracción del implante, las contracturas capsulares, la formación de arrugas, el dolor en el seno y la pérdida de volumen.

Los tres folletos que se encuentran disponibles a través de su médico cirujano proporcionan información detallada acerca de los riesgos y beneficios asociados a los implantes mamarios de MENTOR®: Información importante para pacientes de aumento mamario acerca de los implantes mamarios de gel de silicona de MENTOR® MemoryGel®, Información importante para pacientes de reconstrucción acerca de los implantes mamarios de gel de silicona de MENTOR® y de solución salina, cómo tomar una decisión informada. También podrá obtener esta información en el sitio web [www.mentorwwllc.com](http://www.mentorwwllc.com). Es importante que lea y comprenda estos folletos al considerar implantes mamarios de MENTOR®.

## Recursos para el aumento mamario

Mentor (o su médico cirujano) le proporcionará con mucho gusto una copia del prospecto (instrucciones de uso).

Para obtener información más detallada sobre los estudios clínicos y preclínicos realizados por Mentor, consulte el resumen de datos de seguridad y

eficacia (SSED, summary of safety and effectiveness data) de este producto en [www.fda.gov/cdrh/breastimplants/](http://www.fda.gov/cdrh/breastimplants/).

## Conserve su tarjeta de identificación de implante mamario para consultas posteriores

Si se realiza un aumento mamario, le proporcionarán una tarjeta de identificación del dispositivo con el estilo y número de serie de su(s) implante(s) mamario(s). La recibirá inmediatamente después de su cirugía. Es importante que conserve una copia de esta tarjeta ya que tal vez deba consultar la información posteriormente.

## PÓLIZA DE REEMPLAZO DEL PRODUCTO Y GARANTÍAS LIMITADAS DE MENTOR

En Mentor respaldamos orgullosamente los productos que fabricamos con una póliza de reemplazo y programas de garantías limitadas. Es importante que comprenda que si se somete a un aumento mamario, es posible que la implantación mamaria implique más de una cirugía.

## Póliza de reemplazo del producto de Mentor de por vida:

La póliza de reemplazo del producto de por vida de Mentor ofrece la sustitución gratuita de por vida de sus implantes mamarios MemoryGel® y de solución salina en todo el mundo. Si se requiere la sustitución del implante, y se aplica la Póliza de reemplazo del producto de Mentor, Mentor proporcionará un implante mamario igual o similar durante la vida de la paciente, sin costo alguno. Si se solicita un producto más costoso, Mentor facturará a su médico cirujano la diferencia de precio.

## Implantes mamarios de solución salina de MENTOR®

### Garantía limitada Standard Advantage de Mentor (\$1,200 de asistencia financiera)

Esta garantía es sin cargo para todas las pacientes a las que se les haga implantes de productos de solución salina de MENTOR®. Aquí le presentamos una descripción general de los detalles:

- 🌀 Póliza de reemplazo del producto de por vida<sup>1</sup>
- 🌀 10 años, y hasta un total de \$1,200 de asistencia financiera para cubrir gastos quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia que no estén contemplados por el seguro<sup>2</sup>
- 🌀 Reemplazo de implante contralateral (lado opuesto) sin cargo si el médico cirujano así lo indica
- 🌀 Condiciones no cancelables

### Garantía limitada Enhanced Advantage de Mentor (\$2,400 de asistencia financiera)

Esta garantía opcional limitada está disponible para los productos de implantes mamarios de solución salina y, para acceder a la misma, **se debe adquirir por una cuota de inscripción de \$100 en un plazo de 45 días a partir de la fecha de colocación del implante**<sup>3</sup>. Aquí le presentamos una descripción general de los detalles:

- 🌀 Póliza de reemplazo del producto de por vida<sup>1</sup>
- 🌀 10 años, y hasta un total de \$2,400 de asistencia financiera para cubrir gastos quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia que no estén contemplados por el seguro a partir de la fecha del implante<sup>2</sup>
- 🌀 Reemplazo de implante contralateral (lado opuesto) sin cargo si el médico cirujano así lo indica
- 🌀 Condiciones no cancelables

## Implantes mamarios de MENTOR® MemoryGel®

Mentor es la primera empresa en ofrecer la **Garantía Premier Advantage (\$3,500 de asistencia financiera)**

Ofrece hasta \$3,500 en asistencia financiera, \$1,100 MÁS que nuestra garantía Enhanced:

- 🌀 Póliza de reemplazo del producto de por vida<sup>1</sup>
- 🌀 Esta garantía se aplica a gastos incurridos a partir de una ruptura confirmada por un período de hasta 10 años desde la fecha de la cirugía de implante
- 🌀 La garantía paga hasta \$3,500\*\* en concepto de ayuda financiera para cubrir gastos quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia no contemplados por el seguro y se aplica solamente a cirugías de implante llevadas a cabo después del 1 de mayo de 2009<sup>4</sup>
- 🌀 Reemplazo de implante contralateral (lado opuesto) sin cargo si el médico cirujano así lo indica
- 🌀 Condiciones no cancelables
- 🌀 Y, es bueno saberlo, esta cobertura de garantía adicional es sin cargo

### Conserve sus registros

Con las garantías limitadas Standard, Enhanced y Premier Advantage de Mentor, es importante que mantenga sus propios registros para garantizar la validación de su inscripción. Sólo se podrá exigir a su médico cirujano que conserve sus registros durante un período de tiempo limitado, según las leyes de su estado.

<sup>1</sup> Póliza de reemplazo del producto de por vida: Mentor proporcionará el reemplazo de un producto de Mentor de cualquier tamaño en el mismo estilo o uno similar al del producto originalmente implantado, sin cargo, y durante toda la vida de la paciente. A pedido del médico cirujano, es posible elegir un implante de estilo diferente (sujeto a un cargo por la diferencia entre los precios de lista de los productos). Consulte la garantía limitada Advantage de Mentor para obtener información sobre los requisitos y el programa.

<sup>2</sup> Se dará prioridad de pago a los gastos de sala de cirugías y de anestesia. Para tener derecho a la asistencia financiera, deberá firmar un Formulario de autorización.

<sup>3</sup> Un pago de garantía por cargo de inscripción; la inscripción en el programa de dispositivo de reemplazo exigirá el pago de una cuota de inscripción adicional de \$100.

<sup>4</sup> Tenga en cuenta que: si se sometió a una cirugía de senos antes del 1º de mayo de 2009, la cobertura de su garantía es la que se le ofreció en el momento de su cirugía inicial.



# PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS IMPLANTES MAMARIOS

*Para obtener la información más completa sobre la cirugía de implante mamario, la invitamos a visitar el sitio web de la estética de Mentor: [www.loveyourlook.com](http://www.loveyourlook.com)*

## ¿Qué es un implante mamario?

Cuando alguien dice “implante mamario” está describiendo una cápsula de silicona que se rellena con gel de silicona o solución salina. Los médicos cirujanos que realizan cirugías de aumento y reconstrucción mamaria insertan estos implantes debajo del tejido del seno o del músculo pectoral para crear una línea de busto que se vea y sienta más rellena.

### **Implantes mamarios MemoryGel®**


Los implantes mamarios de MemoryGel® son la próxima generación en implantes de silicona. Están prerellenos de gel de silicona cohesivo propiedad de Mentor. Los implantes mamarios MemoryGel® se mantienen unidos de manera segura y uniforme para brindar una “sensación natural” muy similar a la del tejido mamario natural.

### **Implantes mamarios de solución salina**

Los implantes mamarios de solución salina son cápsulas de silicona rellenas de solución salina (una solución de agua salada) muy similar al líquido corporal natural del que está compuesto la mayor parte del cuerpo humano. Los implantes de solución salina se insertan en el cuerpo sin su relleno y luego se rellenan con la solución salina a través del tubo de llenado durante la cirugía para ajustar y lograr un volumen óptimo. Algunos implantes mamarios de solución salina de Mentor también permiten ajustes luego de la cirugía.

## ¿Qué es la silicona?

La silicona deriva del silicio, un elemento semimetálico o similar a un metal que en estado natural se fusiona

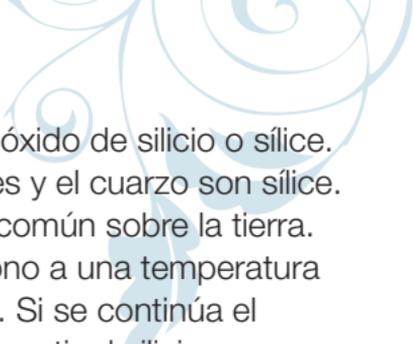

con el oxígeno para formar dióxido de silicio o sílice. La arena de playa, los cristales y el cuarzo son sílice. La sílice es la sustancia más común sobre la tierra. Si se calienta sílice con carbono a una temperatura alta, se puede producir silicio. Si se continúa el procesamiento, se puede convertir el silicio en silicona, que puede ser un líquido, un gel o una sustancia gomosa. Se utilizan diversas siliconas en lubricantes y aceites, al igual que en elastómeros de silicona. La silicona se puede encontrar en varios artículos de consumo comunes, como goma de mascar, esmaltes de uñas, cremas bronceadoras y para manos, antitranspirantes, jabones de tocador y alimentos procesados.

### ¿Son seguros los implantes de gel de silicona?

La FDA ha determinado que los implantes mamarios de MENTOR® son seguros y eficaces. Para obtener información adicional de seguridad a largo plazo, la FDA ha exigido que continuemos controlando nuestros implantes de gel mediante un estudio posterior a la aprobación de aproximadamente 42,000 mujeres durante el transcurso de 10 años. Mentor agradece la oportunidad de realizar este estudio para continuar impulsando a la ciencia y la información sobre la seguridad y eficacia de la silicona.

#### Buenas noticias de la comunidad científica

El Instituto de Medicina (Institute of Medicine), en un estudio altamente reconocido, llegó a la conclusión de que “No existe evidencia de que los implantes de silicona sean responsables de alguna enfermedad grave que afecte a todo el cuerpo. Las mujeres están expuestas a la silicona constantemente en sus vidas diarias.”

### ¿Los implantes mamarios de MENTOR® tienen látex entre sus componentes?

No. Debido a que son muy comunes las alergias al látex, **Mentor nunca utiliza látex** en la fabricación de ninguno de sus implantes mamarios.

### ¿Hay platino activo en los implantes mamarios?

En la fabricación de las cubiertas de los implantes mamarios de silicona y materiales de relleno de gel se utiliza el platino como catalizador. Debido a que

muy pequeñas cantidades de platino permanecen en el producto después de su fabricación, han surgido inquietudes respecto de la posibilidad de que el platino se introduzca en el cuerpo y provoque efectos adversos al difundirse a través de la cubierta intacta, o a través de una ruptura en el implante.

Sin embargo, en 2006, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration) de los Estados Unidos publicó la siguiente conclusión sobre el platino: “Según la información existente, la FDA considera que el platino que se encuentra en los implantes mamarios está en estado de oxidación cero, que implicaría el riesgo más bajo, y así, las pequeñas cantidades de platino que se introducen en el cuerpo a través de la cubierta no representan un riesgo significativo para mujeres que tienen implantes mamarios de siliconas.”\*

## ¿Cuánto pesan los implantes mamarios?

Puede utilizar la siguiente fórmula para estimar el peso de sus implantes mamarios MemoryGel® y los rellenos de solución salina: 1 onza = 30 cc

**Ejemplo:** un implante de 300 cc = 10 onzas  
*El peso del implante variará según su tamaño.*

## ¿Cómo se comparan los cc con el tamaño de copa?

Los volúmenes expresados en cc no se traducen con precisión en tamaños de copa de sostenes.

## ¿Cómo afectan los implantes mamarios en las mamografías?

Con implantes mamarios, las mamografías de rutina pueden volverse más difíciles. El implante puede interferir en la detección de cáncer de mama durante una mamografía y generalmente se necesitan radiografías adicionales y más exposición potencial a la radiación. Si por su edad usted debe realizarse exámenes de mamografía, deberá continuar sometiéndose a los exámenes de mamografías de rutina que le recomiende su médico cirujano de atención primaria. Cuando los realice, asegúrese de informar al técnico en mamografías que usted posee implantes.

\*fuente: [www.fda.gov/cdrh/breastimplants/platinum.html](http://www.fda.gov/cdrh/breastimplants/platinum.html)

## ¿Cuál es la expectativa de vida promedio de un implante mamario?

Es importante saber que los implantes mamarios no duran toda la vida. A pesar de que la duración de los implantes varía de una mujer a otra, los implantes deben sustituirse en algún momento. A menudo una nueva elección induce el reemplazo, como un cambio de tamaño deseado o un cambio en el estilo del implante. Algunas mujeres se someten a la sustitución de implantes mamarios debido a una complicación, como la pérdida de volumen de un implante de solución salina o la ruptura de un implante de gel.

## ¿Los implantes influyen en la incidencia del cáncer de mama?

No se ha descubierto que las pacientes con implantes mamarios tengan mayor riesgo de padecer cáncer de mama que aquellas sin implantes mamarios.

## ¿Debo estar en mi peso ideal antes de someterme a un procedimiento de implante mamario?

Debe estar cerca de su peso ideal si se somete a una cirugía de implante mamario. ¿Por qué? Porque las mujeres que bajan o aumentan una cantidad significativa de peso luego de recibir implantes mamarios a veces modifican los resultados de maneras impredecibles o no deseadas.

## ¿Mis senos se seguirán moviendo como senos normales?

El objetivo es crear senos que se muevan de forma suave y natural. Lograrlo depende de varios factores. Para algunas mujeres, los implantes son más firmes y rígidos en su posición que sus senos naturales.

## Tengo más de 50 años. ¿Soy demasiado vieja para colocarme implantes mamarios?

Su salud general es mucho más importante que su edad. Las mujeres mayores de 50 años pueden colocarse y se colocan implantes. Nunca se es demasiado vieja para lucir de la mejor manera.

## ¿Los implantes mamarios me producirán estrías en los senos?

Pocas veces, pero puede suceder. Si desea tomar todas las precauciones para evitar que aparezcan estrías, existen unas pocas opciones que pueden reducir las probabilidades.

Puede elegir un implante mamario de menor tamaño para minimizar el estiramiento de su piel o un implante ajustable SPECTRUM® de modo que pueda estirar lentamente su piel con el tiempo.

## ¿Perderé la sensibilidad del pezón?

Puede haber un aumento o disminución en la sensibilidad del pezón luego de su cirugía de implante mamario. Una cantidad reducida de mujeres experimentan sensibilidad intensa y otras, ninguna sensación. Estos efectos pueden ser temporales o permanentes.

## ¿Qué sucederá durante el embarazo?

Cada mujer tiene resultados diferentes con los implantes mamarios antes o después de un embarazo.

Si queda embarazada luego de recibir implantes mamarios, sus senos crecerán y pasarán por todos los cambios habituales asociados al embarazo.

La magnitud del aumento varía según cada mujer, y el tamaño de sus implantes será un factor.

## ¿Podré amamantar?

Muchas mujeres con implantes mamarios amamantan a sus bebés con éxito. Se han informado algunas dificultades para amamantar luego de una cirugía de senos, especialmente cuando el médico cirujano utiliza una incisión periareolar (alrededor del pezón). Es importante que informe a su médico cirujano si usted está planificando o considerando quedar embarazada después de la cirugía.

## ¿Cuánto tiempo debo esperar para reanudar la actividad física y otras actividades intensas luego de la cirugía de implante mamario?

Debido a que los períodos de recuperación varían según cada mujer, su médico cirujano determinará

cuanto tiempo de recuperación usted necesitará y cuándo podrá reanudar las actividades normales. Como regla general, los primeros días son los más incómodos. La mayoría de las mujeres regresan completamente a sus vidas normales luego de cuatro a seis semanas. Evite reanudar las actividades intensas que podrían elevar su pulso y presión arterial, o requerir el uso intenso de sus brazos y pecho durante todo el proceso de recuperación. Asegúrese de consultar a su médico cirujano antes de regresar a sus ejercicios de rutina.

### ¿Qué efecto tiene el tabaco sobre el proceso de curación luego de la cirugía?

Fumar puede comprometer la recuperación al ocasionar que los vasos sanguíneos se estrechen y reduzcan el flujo sanguíneo y el oxígeno que transporta la sangre al área quirúrgica. Sus tejidos necesitan este suministro de sangre y oxígeno para curarse adecuadamente. Si se reduce su suministro de sangre, los tejidos se curarán de forma más lenta e irregular.

Por este motivo, muchos médicos cirujanos solicitan a las pacientes que se abstengan de fumar entre una y cinco semanas antes y después de la cirugía. Es importante que pregunte a su médico cirujano cuál sería su recomendación específica para usted.

### ¿Cuándo podré usar un sostén con aros nuevamente?

La mayoría de los médicos cirujanos solicitan a las mujeres que esperen tres meses antes de usar sostenes con aros luego de una cirugía de implante mamario debido a que el cuerpo continúa formando tejido cicatrizal alrededor del implante durante ese período. Asegúrese de pedirle una recomendación a su médico cirujano.

### ¿Puedo ir a salones de bronceado, saunas de infrarrojos o tomar sol si tengo implantes mamarios?

Estas actividades no dañarán los implantes mamarios de ninguna manera, sin embargo, podrían hacer que el tejido cicatrizal se vuelva más visible.

## ¿Cuándo puedo volar o bucear?

Una vez que se encuentre totalmente recuperada, podrá libremente bucear y volar en aviones con algunas consideraciones menores, ya que podría haber una leve expansión y contracción de la cápsula con los cambios de presión.

Con los implantes de solución salina, esto puede producir una cantidad mínima de burbujas de aire en el implante, y tal vez sienta o escuche sonidos del fluido (gorgoteo). Esto debería corregirse solo dentro de las 24 a 48 horas.

## ¿Los implantes mamarios de MENTOR® están cubiertos por una garantía?

Su tranquilidad es importante para nosotros. Todos los productos de MENTOR® vienen con una póliza de reemplazo del producto de por vida de Mentor que ofrece la sustitución gratuita de por vida de nuestros implantes mamarios de gel y solución salina en todo el mundo. Si se requiere la sustitución del implante, y se aplica la Póliza de reemplazo del producto de MENTOR®, Mentor proporcionará un implante mamario igual o similar durante la vida de la paciente, sin costo alguno. Si se solicita un producto más costoso, Mentor facturará a su médico cirujano la diferencia de precio.

### Implantes mamarios de solución salina de MENTOR®

#### Garantía limitada Standard Advantage de Mentor (\$1,200 de asistencia financiera)

Esta garantía es sin cargo para todas las pacientes a las que se les haga implantes de productos de solución salina de MENTOR®. Aquí le presentamos una descripción general de los detalles:

- 🕒 Póliza de reemplazo del producto de por vida<sup>1</sup>
- 🕒 10 años, y hasta un total de \$1,200 de asistencia financiera para cubrir gastos quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia que no estén contemplados por el seguro<sup>2</sup>

🕒 Reemplazo de implante contralateral (lado opuesto) sin cargo si el médico cirujano así lo indica

🕒 Condiciones no cancelables

### **Garantía limitada Enhanced Advantage de Mentor (\$2,400 de asistencia financiera)**

Esta garantía opcional limitada está disponible para los productos de implantes mamarios de solución salina y, para acceder a la misma, **se debe adquirir por una cuota de inscripción de \$100 en un plazo de 45 días a partir de la fecha de colocación del implante**<sup>3</sup>. Aquí le presentamos una descripción general de los detalles:

🕒 Póliza de reemplazo del producto de por vida<sup>1</sup>

🕒 10 años, y hasta un total de \$2,400 de asistencia financiera para cubrir gastos quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia que no estén contemplados por el seguro a partir de la fecha del implante<sup>2</sup>

🕒 Reemplazo de implante contralateral (lado opuesto) sin cargo si el médico cirujano así lo indica

🕒 Condiciones no cancelables

### **Implantes mamarios de MENTOR® MemoryGel®**

#### **Mentor es la primera empresa en ofrecer la Garantía Premier Advantage (\$3,500 de asistencia financiera)**

Ofrece hasta \$3,500 en asistencia financiera, \$1,100 MÁS que nuestra garantía Enhanced:

🕒 Póliza de reemplazo del producto de por vida<sup>1</sup>

🕒 Esta garantía se aplica a gastos incurridos a partir de una ruptura confirmada por un período de hasta 10 años desde la fecha de la cirugía de implante

🕒 La garantía paga hasta \$3,500\*\* en concepto de ayuda financiera para cubrir gastos quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia no contemplados por el seguro y se aplica solamente a cirugías de implante llevadas a cabo después del 1 de mayo de 2009<sup>4</sup>

🕒 Reemplazo de implante contralateral (lado opuesto) sin cargo si el médico cirujano así lo indica

 Condiciones no cancelables

 Y, es bueno saberlo, esta cobertura de garantía adicional es sin cargo

Con las garantías Standard, Enhanced y Premier Advantage de Mentor, es importante que mantenga sus propios registros para garantizar la validación de su inscripción, ya que es posible que su médico no conserve sus registros durante todo el período de duración de la garantía limitada.

Visite el sitio web <http://www.loveyourlook.com/Breast-Implants/breast-implant-warranty.aspx> para obtener más información sobre las condiciones de nuestras garantías limitadas y póliza de reemplazo del producto.

**PARA INSCRIBIRSE** en la garantía limitada Enhanced Advantage, visite el sitio web [www.mentorcorp.com/enhancedadvantage](http://www.mentorcorp.com/enhancedadvantage).

Revise las garantías limitadas completas para conocer los detalles y las limitaciones de la cobertura. Para recibir una copia del documento completo de las garantías limitadas Standard, Enhanced y Premier Advantage de Mentor para implantes mamarios de MemoryGel® y de solución salina, diríjase por correo o telefónicamente al:

**Departamento de Asuntos del Consumidor  
(Consumer Affairs Department)**

Mentor

201 Mentor Drive

Santa Barbara, CA 93111

(866) 250-5115 Opción 3

<sup>1</sup> Póliza de reemplazo del producto de por vida: Mentor proporcionará el reemplazo de un producto de Mentor de cualquier tamaño en el mismo estilo o uno similar al del producto originalmente implantado, sin cargo, y durante toda la vida de la paciente. A pedido del médico cirujano, es posible elegir un implante de estilo diferente (sujeto a un cargo por la diferencia entre los precios de lista de los productos). Consulte la garantía limitada Advantage de Mentor para obtener información sobre los requisitos y el programa.

<sup>2</sup> Se dará prioridad de pago a los gastos de sala de cirugías y de anestesia.. Para tener derecho a la asistencia financiera, deberá firmar un Formulario de autorización.

<sup>3</sup> Un pago de garantía por cargo de inscripción; la inscripción en el programa de dispositivo de reemplazo exigirá el pago de una cuota de inscripción adicional de \$100.

<sup>4</sup> Tenga en cuenta que: si se sometió a una cirugía de senos antes del 1º de mayo de 2009, la cobertura de su garantía es la que se le ofreció en el momento de su cirugía inicial.

También podrá obtener una copia de *Love Your Look®: Your Guide to Breast Augmentation with MemoryGel Breast Implants* (su guía para el aumento mamario con implantes mamarios de MemoryGel®) de Mentora través de su médico cirujano o del sitio web **www.loveyourlook.com**.

Para recibir una explicación detallada sobre los beneficios y riesgos asociados a los implantes mamarios, lea el siguiente folleto para pacientes correspondiente a su procedimiento:

📖 *Información importante para pacientes de aumento mamario sobre los implantes mamarios de gel de silicona de MENTOR® MemoryGel®*

📖 *Información importante para pacientes de reconstrucción mamaria acerca de los implantes mamarios de gel de silicona de MENTOR® MemoryGel®*

📖 *Cirugía de implantes mamarios de solución salina: Cómo tomar una decisión informada*

**Es muy importante** que dedique el tiempo necesario para leer y comprender completamente su folleto y realice a su médico cirujano todas las preguntas que puedan surgirle.

Si recibe implantes mamarios MemoryGel®, se le pedirá que firme el formulario de *Reconocimiento de Decisión Informada* que se encuentra en el folleto. Después de leer y firmar el formulario de decisión informada de su folleto, su médico cirujano la ayudará a decidir qué implante mamario es el correcto para usted.



## Información importante

Para obtener información adicional o si tiene preguntas sobre los implantes mamarios de MENTOR®, llame al 1-800-MENTOR-8. Aquí le presentamos recursos adicionales que pueden brindarle más información:

### Folletos de Mentor

[www.mentorwwllc/breastsurgery/augmentation/downloads.htm](http://www.mentorwwllc/breastsurgery/augmentation/downloads.htm)

 *Información importante para pacientes de aumento mamario sobre los implantes mamarios de gel de silicona de MENTOR® MemoryGel®*

 *Cirugía de implante mamario de solución salina: cómo tomar una decisión informada*

### Mentor Worldwide, LLC

1-800-Mentor-8

[www.mentorwwllc.com](http://www.mentorwwllc.com)

[www.loveyourlook.com](http://www.loveyourlook.com)

### Informe del Instituto de Medicina sobre la seguridad de los implantes de silicona

[www.nap.edu/catalog/9602.html](http://www.nap.edu/catalog/9602.html)

### Administración de Medicamentos y Alimentos

1-888-INFO-FDA o 301-8230

[www.fda.gov/cdrh/breastimplants/](http://www.fda.gov/cdrh/breastimplants/)

Podrá encontrar información importante en la guía del consumidor sobre implantes mamarios de la FDA, la cual se encuentra disponible a través de la vía telefónica o el sitio web arriba mencionados.

### Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (American Society of Plastic Surgeons)

[www.plasticsurgery.org/](http://www.plasticsurgery.org/)

### Academia Americana de Cirugía Estética (American Academy of Cosmetic Surgery)

[www.cosmeticsurgery.org/](http://www.cosmeticsurgery.org/)

## Información de seguridad importante:

La colección de implantes mamarios de MENTOR® son indicados para el aumento mamario en mujeres a partir de los 22 años de edad en el caso de MENTOR® MemoryGel® y a partir de los 18 años de edad en el caso de implantes de solución salina o cuando se trate de casos de reconstrucción mamaria.

No se debe efectuar una cirugía de implante mamario en mujeres que:

-  tengan una infección activa en cualquier parte de su cuerpo,
-  tengan cáncer o un diagnóstico de precáncer de mama y que no hayan recibido tratamiento adecuado para tales afecciones,
-  que estén embarazadas o amamantando.

No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes con enfermedades autoinmunes (por ejemplo lupus y esclerodermia), un sistema inmune debilitado, trastornos que interfieren con la cicatrización de heridas y la coagulación de la sangre, o disminución del riego sanguíneo hacia el tejido mamario. Las pacientes con un diagnóstico de depresión, u otro desorden de la salud mental, deben esperar hasta la resolución o estabilización de estos trastornos antes de someterse a una cirugía de implante mamario.

Existen riesgos asociados a la cirugía de implante mamario. Debe saber que los implantes mamarios no son dispositivos de por vida y la implantación mamaria probablemente no implique una única cirugía. Es posible que necesite cirugías adicionales no planeadas en sus senos debido a complicaciones o resultados estéticos inaceptables. Muchos de los cambios en sus senos después del implante son irreversibles (no pueden deshacerse) y los implantes mamarios pueden afectar su capacidad de amamantar, ya sea por la reducción o la eliminación de la producción de leche.

Entre las complicaciones más comunes con los implantes mamarios de MENTOR® MemoryGel® se encuentran las reintervenciones, las contracturas capsulares, las asimetrías, los tumores o quistes mamarios y los dolores en el seno. Un riesgo menor de complicación es la ruptura del implante, que, en la mayoría de los casos, es silenciosa (lo que quiere decir que ni usted ni su médico sabrán que tiene una). Se recomienda realizarse estudios de resonancia magnética tres años después de la cirugía de implante inicial y luego cada dos años para detectar rupturas silenciosas.

Entre las complicaciones más comunes de los implantes mamarios de solución salina de MENTOR® se encuentran las reintervenciones, la extracción del implante, las contracturas capsulares, la formación de arrugas, el dolor en el seno y la pérdida de volumen.

Los tres folletos que se encuentran disponibles a través de su médico cirujano proporcionan información detallada acerca de los riesgos y beneficios asociados a los implantes mamarios de MENTOR®: Información importante para pacientes de aumento mamario acerca de los implantes mamarios de gel de silicona de MENTOR® MemoryGel®, Información importante para pacientes de reconstrucción acerca de los implantes mamarios de gel de silicona de MENTOR® y de solución salina, cómo tomar una decisión informada. También podrá obtener esta información en el sitio web [www.mentorwllc.com](http://www.mentorwllc.com). Es importante que lea y comprenda estos folletos al considerar implantes mamarios de MENTOR®.



201 Mentor Drive  
Santa Barbara, CA 93111 USA  
(805) 879-6000

Servicio de atención al cliente:  
(800) 235-5731  
Fax: (805) 967-7108  
[www.mentorwllc.com](http://www.mentorwllc.com)